

Multi-Mam[®] KOMPRESSEN

FÜR DIE PFLEGE UND BEHANDLUNG WUNDER UND GERIZTER BRUSTWARZEN

Multi-Mam



BITTE LESEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG VON MULTI-MAM KOMPRESSEN DIESES INFORMATIONSBLATT SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF.

Multi-Mam Kompressen - für die Pflege und Behandlung wunder und gereizter Brustwarzen

- Wirken schnell und beruhigend auf wunde Brustwarzen
- Helfen Infektionen (Mastitis) vorzubeugen
- Unterstützen die natürliche Wundheilung
- Verbessern den Gewebezustand der Brustwarzenhaut
- Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden
- Anwendung mittels weicher, schützender Komresse

Hinweis

Das Gel auf den Multi-Mam Kompressen kann je nach Erntezeit der Pflanzen durchsichtig, trüb, milchig oder gelblich gefärbt sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Rissige und wunde Brustwarzen, Schmerzen beim Stillen

Wunde, verletzte, rissige oder schmerzende Brustwarzen sind häufige Gründe, das Stillen zu beenden. Durch die teils sehr starken Schmerzen kann zudem das Mutter-Kind-Verhältnis gestört werden, denn jedes Stillen wird als Qual und nicht als liebendes Zusammensein empfunden. Schmerzende Brustwarzen können darüber hinaus auch den Milchspendereflex hemmen. Dadurch verkrampt sich die Mutter zunehmend, was oft zum frühen Abstillen führt. Rissige Brustwarzen entstehen durch eine Kombination aus externer, mechanischer Belastung und ungenügender Befeuchtung der obersten Hautschicht. Infektionen werden dadurch begünstigt. Auch wenn es vor allem wichtig ist, die Ursache zu beseitigen (z.B. falsche Positionierung und Anlegetechnik des Babys), muss die irritierte Brustwarze einem genügend feuchten Milieu ausgesetzt werden, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Mit Multi-Mam Kompressen erhält die Mutter eine Möglichkeit zur Linderung der Symptome und zur natürlichen Unterstützung der Wundheilung. Die mit einem bio-aktiven Gel getränkten Kompressen erhalten ein feuchtes Milieu, unterstützen die Wundheilung und schützen die Brustwarze gegen mechanische Reize.

Was sind Multi-Mam Kompressen?

Die Multi-Mam Kompressen wurden speziell für stillende Mütter zur Pflege und Behandlung wunder und gereizter Brustwarzen entwickelt. Eine Multi-Mam Komresse ist ein weiches, Schutzpad, das mit einem bio-aktiven Gel getränkt ist. Das Gel basiert auf dem patentierten 2QR-Komplex, der zahlreiche schädliche Mikroorganismen hemmt. Durch dieses Gel haben die Kompressen eine beruhigende Wirkung auf wunde Brustwarzen, verbessern den Gewebezustand der Haut, verringern Schwellungen und helfen Infektionen vorzubeugen. Das Gel basiert auf pflanzlichen, natürlichen Bestandteilen. Das Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Der Geschmack des Gels ist nicht unangenehm für das Kind. Die dünne Beschichtung der Rückseite verhindert das Beflecken des Büstenhalters.

Wie verwenden Sie Multi-Mam Kompressen?

Die Multi-Mam Kompressen sind einzeln in Briefchen verpackt und sollten zwischen dem Stillen aufgelegt werden. Öffnen Sie das Päckchen, entfalten Sie die Komresse und legen Sie die Seite mit dem Gel auf Ihre Brustwarze. Lassen Sie die Komresse solange auf der Brustwarze liegen bis das Gel eingezogen ist. Wenn möglich entfernen Sie das Pad ca. eine halbe Stunde vor dem Stillen und legen Sie es dann wieder auf. Das Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Wiederholen Sie die Behandlung mindestens 2 mal täglich bis die Irritationen verschwunden sind. Eine Komresse sollte jeweils für eine Anwendung benutzt werden. Liegen aber nicht mehr als 3 Stunden zwischen 2 Stillintervallen, kann die Komresse ein zweites mal verwendet werden. Die Komresse wird direkt auf die Brustwarze gelegt und unter dem BH und der Stillenlage getragen.

Tipp: Kühlhalt aus dem Kühlschrank hat die Komresse eine zusätzlich angenehme Wirkung.

Bestandteile

Das bio-aktive Gel basiert auf dem natürlichen, pflanzlichen 2QR-Komplex. Es wurden keine schädlichen Nebenwirkungen beobachtet.

Allergische Reaktionen auf die Bestandteile von Multi-Mam Kompressen kommen nur sehr selten vor. Sollten Sie allergisch gegen bestimmte pflanzliche Stoffe sein, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Menge des Gels auf die Innenseite des Unterarms aufzutragen. Treten danach Juckreiz und Rötungen auf, sind Sie wahrscheinlich gegen einen der Bestandteile von Multi-Mam Kompressen allergisch. Wir empfehlen Ihnen, Multi-Mam Kompressen dann nicht zu verwenden.

Zusammensetzung

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin (pflanzlichen Ursprungs), Xanthan Gum.

*2QR-Komplex: patentierte bio-aktive Polysaccharide. www.2QR.com

Ohne Konservierungsstoffe!

Bitte nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der oben genannten Inhaltsstoffe.


Die Farbe des bio-aktiven Gels

Die Farbe des bio-aktiven Gels kann von farblos bis bräunlich variieren. Der Grund dafür findet sich beim wesentlichen Inhaltsstoff, dem 2QR-Wirkkomplex. Als Naturprodukt ist dieser den natürlichen Farbschwankungen unterworfen. Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts werden davon jedoch nicht beeinflusst.


Testen Sie auch...

- **Multi-Mam Balsam:** Zur Pflege empfindlicher und irritierter Brustwarzen
- **Multi-Mam BabyDent:** Wohltuende Linderung bei Zahnungsbeschwerden.


Wie verwenden Sie Multi-Mam Kompressen?

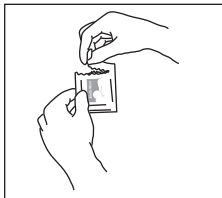

1. Öffnen Sie das Päckchen.

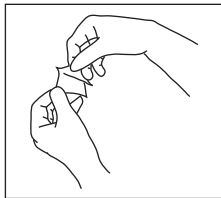

2. Entfalten Sie die Komresse.

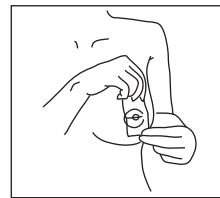

3. Legen Sie die Seite mit dem Gel auf Ihre Brustwarze. Lassen Sie die Komresse solange auf der Brustwarze liegen bis das Gel eingezogen ist.

Vertrieb:
Ardo medical GmbH,
Argelsrieder Feld 10,
82234 Oberpfaffenhofen
PZN: 04952565

Hergestellt von:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Niederlande

WWW.MULTI-MAM.DE



0482



25°C
10°C

AG410L.16

F16

Multi-Mam KOMPRESSEN

FÜR DIE PFLEGE UND BEHANDLUNG WUNDER UND GERIZTER BRUSTWARZEN



Empfehlung:

Bei verschiedenen Beschwerden im Intimbereich
Multi-Gyn: Bio-aktive Produkte für die vaginale Gesundheit



Die Bio-aktiven Multi-Gyn Produkte nehmen eine interessante Stellung in der persönlichen Intimpflege und Selbstbehandlung ein. Multi-Gyn Produkte basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen. Sie sind auch zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

Multi-Gyn FemiWash

Bio-aktiver Mikroschaum für die tägliche Hygiene/Intimrasur. Milder und seifenfreier Intimwaschschaum für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich.
100ml, PZN: 04952660

Multi-Gyn LiquiGel

Bio-aktives Vaginalgel bei Scheidentrockenheit. Lindert Trockenheit und Irritationen durch Befeuchtung und fördert die natürliche Befeuchtung. Hormonfrei.
30ml, PZN: 09732443

Multi-Gyn ActiGel

Bio-aktives Gel zur Vorbeugung und Behandlung von verschiedenen bakteriellen Infektionen und den damit zusammenhängenden Problemen wie Ausfluss, Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Wundheit.
30ml, PZN: 04952648

Multi-Gyn FloraPlus

Speziell zur Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen.
5 Einmalapplikatoren (Einmaltuben), PZN: 06916208

Multi-Gyn Kompressen

Kompressen mit bio-aktivem Gel bei äußeren Beschwerden im Intimbereich (Damm, Vulva, Schamlippen und Anus) wie Gewebeschäden, Juckreiz, Empfindlichkeit, Reizungen, Schwellungen oder Hämorrhoiden.
12 Einzelkompressen, PZN: 04867635

Multi-Gyn Vaginaldusche

Ergonomisch gestaltete Vaginaldusche zur sanften Vaginalhygiene, Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Vaginalinfektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen.
PZN: 04952737

Multi-Gyn Brausetabletten

Zur Herstellung einer bio-aktiven Vaginalspüllösung für die Vaginaldusche.
10 Tabletten, PZN: 04952743

Multi-Gyn IntiSkin

Intim-Wohlfühlspray auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe vor/nach Sport, Geschlechtsverkehr, Rasur, etc.
40ml, PZN: 04435485

Multi-Gyn IntiFresh

12 Feuchttücher zur Intimpflege. Dermatologisch getestet.
PZN: 10102658

MULTI-GYN PRODUKTE SIND IN JEDER APOTHEKE ERHÄLTlich.
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

WWW.MULTI-GYN.DE